



INSTRUCTIES VOOR STAALAFNAME - CYTOLOGIE

BLAASSPOELVOCHT, CYTOLOGIE URETER

Uitvoerfrequentie

Iedere werkdag (maandag tem vrijdag, behalve op feestdagen).

Antwoordtijd

Volgende werkdag na afgifte van staal op labo anatomo-pathologie.

Instructies voor staalafname

Bij voorkeur het staal fixeren met een gelijke hoeveelheid ethanol 50%. Indien geen ethanol voorhanden is, dan het staal onmiddellijk, na verwittigen van anatomo-patholoog, afgeven op het labo anatomo-pathologie (met vermelding 'VERS' op aanvraagformulier).

Aanvraagformulier

Klassiek aanvraagformulier voor biopsie/cytologie, met etiket volledige patiëntengegevens, aanvrager en handtekening aanvrager.

Zorg altijd voor goede klinische informatie.

Indien dit een afgedrukt document is, controleer <http://www.sezz.be> voor recentste versie.

instructies voor staalafname-cytologie-blaasspoelvocht, cytologie ureter versie mei 2015