



INSTRUCTIES VOOR STAALAFNAME - CYTOLOGIE

URINECYTOLOGIE

Uitvoerfrequentie

Iedere werkdag (maandag tem vrijdag, behalve op feestdagen).

Antwoordtijd

Volgende werkdag na afgifte van staal op labo anatomo-pathologie.

Instructies voor staalafname

Bij voorkeur midstream urine, geen ochtend urine.

Fixeer de urine met een gelijke hoeveelheid ethanol 50% (...). Sluit het deksel van het potje volledig en zet het potje rechtop, om lekken te vermijden. Breng het staal dezelfde dag nog naar het labo anatomo-pathologie.

Aanvraagformulier

Klassiek aanvraagformulier voor biopsie/cytologie, met etiket volledige patiëntengegevens, aanvrager en handtekening aanvrager.

Zorg altijd voor goede klinische informatie.

Indien dit een afgedrukt document is, controleer <http://www.sezz.be> voor recentste versie.

instructies voor staalafname-cytologie-urinecytologie versie mei 2015